



Pro Formula

Diversey  
Unilever

Wasprocedure voor herbruikbare gezichtsmaskers

Wasprocedure voor herbruikbare gezichtsmaskers

1



Het masker verwijderen

Was uw handen met een antibacteriële zeep gedurende minstens 20 seconden.

Buig lichtjes voorover en verwijder de elastieken van uw oren. Doe het hele masker af in een voorwaartse beweging, weg van uw hoofd. Raak daarbij de voorkant van het masker niet aan.

2



Maskers verzamelen

Verzamel gezichtsmaskers in een APARTE zak die alleen wordt gebruikt voor besmet textiel. Verzamel maskers met vergelijkbare kleuren elk in één zak om te voorkomen dat ze nog gesorteerd moeten worden voor de was. Sluit de zak.

Was uw handen opnieuw met een antibacteriële zeep nadat u het masker in de waszak hebt gedeponneerd. Handdesinfecterend middel (alcohol 70%) aanbrengen

3



De wasmachine beladen

Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in overeenstemming met de lokale richtlijnen voor volksgezondheid.

Potentieel geïnfecteerd textiel niet sorteren of voorbehandelen, maar rechtstreeks in de machine plaatsen. Vul de machine met vervuild textiel van vergelijkbare kleuren aan ongeveer 85% van de capaciteit van de wasmachine. Reinig en desinfecteer de contactpunten van de machine (handgrepen, deur, paneel enz.) na elk gebruik. Verwijder de PBM en gooi deze weg. Was uw handen.

4

Verbeterd wasprogramma:

60°C gedurende 25 min



De juiste wascyclus kiezen

Volg een lokaal goedgekeurde wasprocedure voor thermische desinfectie of chemothermische desinfectie. U kunt ook de bovenstaande WHO-richtlijnen volgen.

Om een volledig reinigings- en desinfectieproces te bereiken, gebruikt u een van Diversey's detergenten/desinfectiemiddelen of een combinatie van detergent en desinfectiemiddel volgens de instructies.

5



Gewassen maskers en textiel uit machine halen

Was uw handen met een antibacteriële zeep voordat u de machine opent gedurende minstens 20 seconden.

Het gewassen en propere textiel in een PROPERE wasmand of waskar laden.



Maximale wachttijd 30 minuten

Maskers/textiel verzamelen

De wachttijd tussen het einde van het wasproces en het begin van het drogen moet tot een minimum worden beperkt. Maximale wachttijd [nat] = 30 minuten

6



De droogkast beladen

Vul de droogkast, rekening houdend met het juiste laadgewicht voor uw machine. Gebruik een maximale temperatuur van 60°C. Het textiel aan de lucht laten drogen wordt afgeraden, dit om kruisbesmetting te voorkomen.

Reinig en desinfecteer na elk gebruik de contactpunten van de machine (handgreep, deur, paneel enz.).



Draag geschikte PBM in overeenstemming met de lokale richtlijnen voor volksgezondheid. Indien niet beschikbaar, volg de WHO-richtlijnen voor het dragen van PBM.

Omo Hygiëne Waspoeder

- Uitzonderlijke prestatie voor een groot aantal moeilijk verwijderbare vlekken
- Super hygiënische en super krachtige vlekverwijderaar, reeds op lage temperatuur, voor uw meest veeleisende was

